

# COME INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2

1



LAVATI  
LE MANI

2



TIRA LE FASCE  
DIETRO LE ORECCHIE

3



INDOSSA  
LA MASCHERA

4



PREMI LA BARRA  
NASALE

5



CONTROLLA  
LA TENUTA

6



RESPIRA  
NORMALMENTE

**COD. SY95-1**

## Istruzioni d'uso

Allineare la barra nasale (nichel-free) al naso e indossare la mascherina portando gli elastici dietro le orecchie.

Regolare delicatamente la barra nasale.

Assicurarsi che la maschera sia ben posizionata coprendo il viso dal dorso del naso fino a sotto il mento.

Le mascherine devono essere smaltite nei contenitori dei rifiuti indifferenziati, o secondo le disposizioni dei Comuni di appartenenza.

## Modalità d'uso

Le mascherine monouso possono essere utilizzate fino a 4 ore continuative e non sono riutilizzabili.

Istruzioni complete e dichiarazioni di conformità su **[www.xenergyitalia.it](http://www.xenergyitalia.it)**

MADE IN PRC

Importato da: General Auto Srl  
Via Prof. Filippo Manna, 31  
80013 Casalnuovo di Napoli (NA) – Italia  
P. IVA 00326830635 - Tel. +39 081 5228490